

APTOS



Light Lift — Fäden, die auf Basis von bioresorbierbarem Material hergestellt worden sind, welches aus dem Organismus innerhalb von 360 Tagen restlos ausgeschieden wird.

Dank seiner Struktur mit mikroskopisch kleinen Widerhaken wird das Material in den Weichteilen sicher fixiert und formt ein stabiles unterstützendes Gerüst. Den zusätzlichen verjüngenden Effekt verdankt man der L-Milchsäure, die die Hautalterungsprozesse bremst und die Hautrevitalisierung aktiviert. Erkennbare Resultate werden auf den verschiedenen Gesichtsabschnitten erzielt

Schnelle Ergebnisse

Die Methode Light Lift ermöglicht ein erstklassiges ästhetisches Ergebnis ohne einen traditionellen chirurgischen Eingriff. Die ersten Verbesserungen sind schon am Tag der Prozedur sichtbar. Nach 2-3 Wochen entfaltet sich der Effekt vollständig und verbleibt im Durchschnitt bis zu 2 Jahren*.

Minimale Traumatas

Die Fäden werden mit Hilfe einer speziellen Führungs-Nadel über Haut-Punkteinstiche implantiert. Die Sicherheit der Anwendung von Produkten aus der Serie Light Lift ist auch durch die Anwendung von resorbierbaren Materialien gewährleistet.

Komplexität

Die Methoden von Light Lift ergeben die besten Resultate in Kombination mit klassischen kosmetischen Behandlungen (verschiedene Arten von Peeling, Füllern und Botulinustoxin-Injektionen)

* variiert durch individuelle Besonderheiten des Patienten

Die Behandlung

Die Behandlung erfolgt ambulant unter Verwendung von lokaler Infiltrationsanästhesie. Das Lifting des gesamten Gesichtes dauert nicht mehr als 30-40 Minuten, das Lifting von Einzelregionen dauert 10-15 Minuten.

Kontraindikationen

Akute Infekte, onkologische Pathologien, Entzündungsprozesse und Blutgerinnungsstörungen

Empfehlungen

Den Patienten wird empfohlen, 2-3 Wochen nach der Prozedur von aktiver Mimik, Massagen, Fitness und Sauna Abstand zu halten.





Light Lift

Thread 2G

2 Generation

Resorbierbarer Faden mit Widerhaken, in Verbindung mit gepaarten Nadeln

Die Einmaligkeit dieser Nadeln besteht darin, dass sie miteinander mit einer temporären Verbindung zusammengefügt sind - zu einer gemeinsamen Spitze. Diese Konstruktion erlaubt das Einführen in die Haut beider Nadeln durch nur einen Punkt-Einstich, danach lassen sich die Nadeln sehr leicht trennen und in die nötigen Richtungen führen.



In einer Verpackung: 4 Nadeln, 110mm lang, resorbierbarer Faden mit Widerhaken, USP 2/0 Das Lifting mit Light Lift 2G zeigt langlebige und stabile Erfolge. Diese Methode ist einfach in der Handhabung, minimal traumatisierend und sehr sicher. Die Prozedur erfolgt ohne Schnitte und hinterlässt keine Narben und Schrammen



Die temporär gepaarten doppelspitzen Nadeln mit einer gemeinsamen Spitze ermöglichen das Führen des Fadens unter der Haut in jede Richtung. Diese neueste Erfindung gewährt die Möglichkeit der unsichtbaren subkutanen Nähstiche, die Weichteile gruppiert oder versetzt, um das beste ästhetische Ergebnis zu erzielen

Solch ein Lifting ist sehr effektiv und delikat: Die doppelspitze Nadel kann unter der Haut ohne Zusatzschnitte gedreht werden, der Faden mit Widerhaken spannt nicht die Haut.

Light Lift

Needle 2G

Doppelseitige Nadel mit resorbierbarem Faden mit Widerhaken



In einer Verpackung:

4 doppelspitze gerade Nadeln 100mm Länge, resorbierbarer Faden mit Widerhaken 50cm Länge, USP 2/0





Raffinierte Springfeder-Fäden aus resorbierbarem Material, die subkutan fixiert werden, straffen die Mundwinkel, dabei werden Marionetten-Falten behoben.

Die Methode erlaubt die Weichteilbereiche nach oben zu ziehen, dabei werden die Springfeder-Fäden in die Arbeit der mimischen Muskulatur mit einbezogen, ohne den Gesichtsausdruck zu verändern.

Light Lift

Spring

Resorbierbare Springfeder-Fäden, befestigt an der Führungs-Nadel





In einer Verpackung: 4 resorbierbare Springfeder-Fäden auf Nadeln 1,1 x 100mm, USP 2/0 **Aptos**

Wire 2 G

Draht-Skalpell mit gerader doppelspitzer Führungs-Nadel





In einer Verpackung:

Doppelspitze Nadel 100mm Länge, Stahldraht 60cm Länge USP 3/0





Aptos Wire 2G korrigiert Falten und Furchen, atrophische und eingezogene Narben im Gesicht und Körper, Hautunebenheiten, auch subkutane, entstanden durch misslungene Fettaspiration.

Die Prozedur erfolgt ohne Hautschnitte, nur durch Haut-Einstiche. Mithilfe der Nadel wird der Draht subkutan eingeführt, dabei wird die betroffene Stelle umrandet. Mit sägenden Bewegungen werden die Weichteile delaminiert, dabei werden die Verwachsungen gelöst und die Unebenheiten korrigiert.



Korrekturzonen:

- 1. Stirnfalten
- 2 Zornesfalten
- 3. Nasolabialfalten
- 4. Falten im Kinnbereich
- 5. Falten am Hals

Aptos

Model

In einer Verpackung:



- 1. Aptos Model
- 2. Unsterile Materialien Aptos für Training
- 3 DVD mit
- Schulungsmaterial
- 4. Anleitungen

5. Abwischbarer Marker KNOW HOW Für Ärzte-Training haben wir ein spezielles Gesichts-Modell entwickelt, das aus einem besonderen Material besteht, welches mit den Merkmalen des Gewebes wie ausgeprägten "Falten", "Furchen", und "Ptosis der Weichteile" ausgestattet ist. Auf diesem Modell kann der Arzt seine Manipulationen und Operationen durchführen und dabei praktische Erfahrungen sammeln

Das Aptos Model hilft den Kollegen nicht nur unsere neuen Methoden zu beherrschen, sondern auch andere Manipulationen am Patienten zu üben (richtige Gabe von Fillern und anderen Präparaten).



202211185).



